

OCUflash®

oční kapky, roztok

Tento výrobek je zdravotnický prostředek. Před použitím si prosím přečtěte tuto uživatelskou příručku. Uchovejte si tyto písemné informace. Možná si je budete muset znovu přečíst.

Popis přípravku

Oční kapky OCUflash, roztok, jsou izotonický irigační roztok s přísadou extraktu ze Světlíku lékařského (Euphrasia officinalis). Oční roztok je plněn do vícedávkové lahvičky uzavřené šroubovacím uzávěrem, označené štítkem. Lahvička je balena v papírové krabičce spolu s návodem k použití. 1 ml roztoku obsahuje 30 kapek.

Výplach očí

Oční kapky OCUflash jsou určeny k vyplachování oka zasaženého dráždivými částicemi nebo chemikáliemi. Bez doporučení lékaře je lze použít k jednoduchému krátkodobému výplachu a poté k vkapávání do očí nebo k obkladům očních víček.

Dezinfekční účinek

Extrakt ze Světlíku lékařského má protizánětlivé, dezinfekční a adstringentní účinky na oči. Tyto vlastnosti Světlíku lékařského se již dlouho používají ke zklidnění očí, jako prevence a podpůrná léčba neinfekčních zánětů víček a spojivek. Přípravek je vhodný k použití při odstraňování kosmetických přípravků z okolí oka (víčka, řasy).

Složení roztoku:

Chlorid sodný 7 mg v 1 ml, benzalkonium-chlorid, edetan disodný, chlorid draselný, hexahydrát chloridu hořečnatého, polysorbát 80, tinktura Světlíku lékařského, borax, hydroxid sodný, čištěná voda.

Pomocné látky se známým účinkem: konzervační látka – benzalkonium-chlorid 0,04 mg v 1 ml (0,004 %), tinktura Světlíku lékařského 2,0 mg v 1 ml (0,2 %).

Určené použití

Oční kapky OCUflash, roztok, jsou určeny k vyplachování dráždivých částic, chemikálií a cizích těles z oka, k proplachování oka v případě poranění očního povrchu a k vkapávání do oka při vystavení faktorům prostředí (např. znečištění, alergen, používání počítače, klimatizace) jako prevence a doplňková symptomatická léčba neinfekčního zánětu očních víček, spojivky a chronických infekcí spojivky.

Indikace

Mezi specifické indikace pro oční kapky OCUflash, roztok, patří:

1. výplach očí po tonometrii a gonioskopii
2. výplach očí po nošení tvrdých kontaktních čoček
3. výplach očí, odstranění cizích těles, prachu a chlorované vody
4. vyplachování zbytků roztoků fluoresceinu
5. vyplachování hlenu a hnisavých sekretů
6. jako první pomoc po lehkých popáleninách spojivky a očí kyselinami a zásadami (vápno, malta), poranění očního povrchu
7. jako podpůrný prostředek při některých, zejména neinfekčních konjunktivitidách (alergie) a chronických konjunktivitidách.

Cílová populace a uživatelé

Oční kapky OCUflash, roztok, mohou používat dospělí, dospívající a děti.

Omezení použití

Neexistují žádná omezení týkající se pohlaví, věku a/nebo hmotnosti uživatelů. Vzhledem k bezpečnosti přípravku jej lze podávat i novorozencům, kojencům, těhotným ženám a kojícím matkám.

Dávkování

Výplach očí

Při vyplachování cizích těles z oka aplikujte roztok, dokud cizí látka nebo tělesa nejsou odstraněna, nebo dokud nezmizí nepříjemné pocity.

Neinfekční zánět spojivek

Do dolního spojivkového vaku vkapávejte 1–2 kapky 1–4krát denně.

Pokyny před aplikací

Po otevření je roztok očních kapek OCUflash připraven k vkápnutí do oka. Pacient odšroubuje ochranný uzávěr, mírně zakloní hlavu, otočí lahvičku dnem vzhůru a stisknutím lahvičky vkápně předepsaný počet kapek do dolního spojivkového vaku oka. Množství aplikovaného roztoku závisí na účelu aplikace. Při zánětech očních víček lze roztok použít také k obkladům.

Kontraindikace

Oční kapky OCUflash, roztok, se nesmí používat v případě precitlivělosti na kteroukoli složku přípravku.



Varování

- Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud jste alergičtí na některou složku přípravku. Pokud zaznamenáte jakékoli nežádoucí účinky, kontaktujte svého lékaře.
- Nepoužívejte tento přípravek, pokud si před prvním otevřením lahvičky všimnete, že je bezpečnostní kroužek šroubovacího uzávěru poškozený nebo je obal poškozen.
- Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, a to ani v případě, že je lahvička stále uzavřena. Datum expirace je uvedeno na štítku nebo krabičce vedle ikony přesýpacích hodin a vztahuje se k poslednímu dni v měsíci.
- Po otevření lahvičky lze přípravek používat pouze po dobu 28 dnů.
- Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

- Přípravek nelze použít po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu, a to ani v případě, že je lahvička stále uzavřena.
- Při aplikaci přípravku se kapátko nesmí dotýkat oka ani očního víčka. Po aplikaci musí být uzávěr pevně zašroubován, aby se zabránilo možné kontaminaci.



Upozornění

Upozornění pro nositele kontaktních čoček Tento přípravek obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid která může změnit barvu měkké kontaktní čočky. Před použitím tohoto přípravku vyjměte kontaktní čočky z očí a po aplikaci počkejte 15 minut, než si je znovu nasadíte.

Současné používání jiných očních přípravků

Pokud používáte i jiné oční kapky nebo masti, vyčkejte alespoň 5 minut mezi jednotlivými aplikacemi. Oční mast aplikujte jako poslední.

Řízení vozidel a obsluha strojů

Krátce po vkápnutí přípravku do oka se může dočasně objevit rozmazané vidění. Proto neřídte motorová vozidla ani nevykonávejte jiné činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, dokud se vaše zraková schopnost nevrátí k normálu.

Pokud se nepříjemné pocity, kvůli kterým byl přípravek aplikován, nezlepší a přetrvávají, nebo se dokonce zhoršují, navštivte svého očního lékaře.

Aby se snížilo riziko zkřížené kontaminace a přenosu infekce, měla by obsah jedné lahvičky používat pouze jedna osoba.

Nežádoucí účinky

Oční kapky OCUflash, roztok, jsou velmi dobře snášeny. Vzácně se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:

- Alergická reakce, která se může projevit jako mírná vyrážka, exfoliativní dermatitida nebo erythema multiforme
- Změny epitelu, poškození očí
- Hyperémie
- Slzení
- Lokální podráždění (pálení, svědění, štípání, mírné nepohodlí)

Jákykoli závažný incident, ke kterému došlo v souvislosti s prostředkem, by měl být nahlášen výrobcí neziaduceucinky@unimedpharma.sk a příslušnému orgánu prostřednictvím národního systému hlášení členského státu, ve kterém je uživatel usazen.

Interakce Zatím nejsou známy.

Klinický přínos

Oční kapky OCUflash, roztok, pomáhají předcházet podráždění, poškození očí, zánětu nebo infekci oka tím, že proplachují povrch oka od zbytkových částic, jako jsou cizí tělesa, prach, roztok fluoresceinu nebo hlenové a hnisavé sekrety, které by jinak mohly oko poškodit a/nebo způsobit zánět nebo infekci a zhoršení základního onemocnění. OCUflash lze také použít jako doplňkovou symptomatickou léčbu neinfekčního zánětu očních víček, spojivky (včetně alergie) a chronických infekcí spojivky.

Pokyny k uchovávání a likvidaci

Uchovávejte při pokojové teplotě 10–25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nepoužitý přípravek vraťte do lékárny. Čistý obalový materiál zlikvidujte zodpovědně v souladu s místními pokyny v příslušné nádobě na tříděný odpad.

Obsah balení

Polyethylenová (LDPE) lahvička s LDPE kapátkem, bílý polypropylenový (PP) šroubovací uzávěr s bezpečnostním kroužkem. Plastová lahvička je balena v kartonové krabičce.

Velikost balení: 1 x 10 ml, 2 x 10 ml

Výrobce:



UNIMED PHARMA spol. s r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
E-mail: unimedpharma@unimedpharma.sk
www.unimedpharma.eu

Význam piktogramů na obalu

	Výrobce		Číslo šarže
	Datum výroby		Použitelné do
	Teplotní omezení		Přečtěte si návod k použití
	Zdravotnický prostředek		Nepoužívejte, pokud je obal poškozen, a řiďte se pokyny k použití
	Sterilizováno aseptickými technikami		Uchovávejte v suchu
	Uchovávejte mimo dosah slunečního záření		Upozornění
	Počet kapek v 1 ml		Jedinečný identifikátor prostředku

Datum poslední revize textu: březen 2025



Oriešková 11, 821 05 Bratislava,
Slovenská republika

