

OCUflash[®] blue

oční kapky, roztok

Tento výrobek je zdravotnický prostředek. Před použitím si prosím přečtěte tuto uživatelskou příručku. Uchovejte si tyto písemné informace. Možná si je budete muset znovu přečíst.

Popis přípravku

Oční kapky OCUflash blue, roztok, jsou izotonický irigační roztok s přísadou extraktu ze Světlíku lékařského (Euphrasia officinalis). Oční kapky OCUflash blue neobsahují konzervační látky. Jsou dodávány v balení obsahujícím 1 x 10 ml v lahvičce pro více použití se speciálním uzávěrem Novelia. Lahvička je označena štítkem a balena v papírové krabičce spolu s návodem k použití. 1 ml roztoku obsahuje 30 kapek.

Výplach očí

Oční kapky OCUflash blue bez konzervačních látek jsou určeny k vyplachování oka zasaženého dráždivými částicemi nebo chemikáliemi. Bez doporučení lékaře je lze použít k jednoduchému krátkodobému výplachu a poté k vkapávání do očí nebo k obkladům očních víček.

Dezinfekční účinek

Extrakt ze Světlíku lékařského má protizánětlivé, dezinfekční a adstringentní účinky na oči. Tyto vlastnosti Světlíku lékařského se již dlouho používají ke zklidnění očí, jako prevence a podpůrná léčba neinfekčních zánětů víček a spojivek. Přípravek je vhodný k použití při odstraňování kosmetických přípravků z okolí oka (víčka, řasy).

Složení roztoku:

Hlavní složka: Chlorid sodný 7 mg v 1 ml,
Pomocné látky: edetát disodný, chlorid draselný, hexahydrát chloridu hořečnatého, polysorbát 80, tinktura světlíku lékařského, borax, hydroxid sodný, čistěná voda.

Pomocné látky se známým účinkem:
Tinktura Světlíku lékařského 2,0 mg v 1 ml (0,2 %).

Nositelé kontaktních čoček:

OCUflash blue neobsahuje konzervační látky, takže je vhodný pro nositele kontaktních čoček a pro osoby s citlivými očima.

Určené použití

Oční kapky OCUflash blue jsou určeny k vyplachování dráždivých částic, chemikálií a cizích těles z oka, k proplachování oka v případě poranění očního povrchu a k vkapávání do oka při vystavení faktorům prostředí (např. znečištění, alergeny, používání počítače, klimatizace) jako prevence a doplňková symptomatická léčba neinfekčního zánětu očních víček, spojivky a chronických infekcí spojivky.

Indikace

Mezi specifické indikace pro oční kapky OCUflash blue patří:

1. výplach očí po tonometrii a gonioskopii
2. výplach očí po nošení tvrdých kontaktních čoček
3. výplach očí, odstranění cizích těles, prachu a chlorované vody
4. vyplachování zbytků roztoků fluoresceinu
5. vyplachování hlenu a hnisavých sekretů
6. ako první pomoc po lehkých popáleninách spojivky a očí kyselinami a zásadami (vápno, malta), poranění očního povrchu
7. ako podpůrný prostředek při některých, zejména neinfekčních konjunktivitidách (alergie) a chronických konjunktivitidách.

Cílová populace a uživatelé

Oční kapky OCUflash blue, roztok, mohou používat dospělí, dospívající a děti.

Omezení použití

Neexistují žádná omezení týkající se pohlaví, věku a/nebo hmotnosti uživatelů.

Vzhledem k bezpečnosti přípravku jej lze podávat i novorozencům, kojencům, těhotným ženám a kojícím matkám.

Dávkování

Výplach očí

Při vyplachování cizích těles z oka aplikujte roztok, dokud cizí látka nebo tělesa nejsou odstraněna, nebo dokud nezmizí nepříjemné pocity.


Neinfekční zánět spojivek

Do dolního spojivkového vaku vkapávejte 1–2 kapky 1–4krát denně.

Pokyny před aplikací

Po otevření jsou oční kapky OCUflash blue připraveny k vkápnutí do oka.

1. Umyjte si ruce a pohodlně se posadte nebo postavte.
2. Odšroubujte víčko lahvičky.

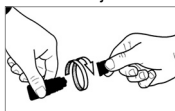


3. Držte lahvičku mezi palcem a ostatními prsty směrem dolů.
4. Před první aplikací se doporučuje ukápnout první kapku z oka jemným stlačením lahvičky, protože při silném a nerovnoměrném stlačení lahvičky může dojít k vystřikovávání většího objemu roztoku.
5. Prstem jemně stáhněte spodní víčko postiženého oka dolů.



6. Umístěte hrot kapátka blízko oka, ale tak, aby se nedotýkal oka ani přilehlých oblastí oka.
7. Jemně stiskněte lahvičku tak, aby se do oka dostala pouze 1–2 kapky, nebo více kapek v případě nutnosti vypláchnutí. Poté uvolněte spodní víčko a pomalu zavřete oko, aby se roztok očních kapek OCUflash blue rovnoměrně rozprostřel po povrchu oka.

Před dalším vkápnutím nechte vzduch do plastové lahvičky nasát, aby se vrátila do původního stavu, a poté pokračujte v aplikaci do oka podle doporučení.

Upozorňujeme, že mezi stisknutím a vytékáním kapky může uplynout několik sekund. Lahvičku nesmíte stisknout příliš silně.

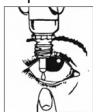

8. V případě potřeby postup opakujte pro druhé oko.



9. Po použití je třeba lahvičku jednou protřepat směrem dolů, aniž byste se

dotkli hrotu kapátka, aby se odstranila veškerá zbytková tekutina na hrotu. To je nezbytné k zajištění sterility očních kapek a snazší aplikaci další kapky při následné aplikaci.

10. Ihned po aplikaci pevně uzavřete víčko lahvičky.

Při zánětech očních víček lze roztok použít také k obkladům.

Kontraindikace
Oční kapky OCUflash blue se nesmí používat v případě přecitlivělosti na kteroukoli složku přípravku.

Varování

- Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud jste alergičtí na některou složku přípravku. Pokud zaznamenáte jakékoli nežádoucí účinky, kontaktujte svého lékaře.
- Nepoužívejte tento přípravek, pokud si před prvním otevřením lahvičky všimnete, že je bezpečnostní kroužek šroubovacího uzávěru poškozený nebo je obal poškozen.
- Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, a to ani v případě, že je lahvička stále uzavřená. Datum expirace je uvedeno na štítku nebo krabičce vedle ikony přesýpacích hodin a vztahuje se k poslednímu dni v měsíci.
- Po otevření lahvičky lze přípravek používat pouze po dobu 3 měsíců.
- Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
- Přípravek nelze použít po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu, a to ani v případě, že je lahvička stále uzavřená.
- Při aplikaci přípravku se kapátko nesmí dotýkat oka ani očního víčka. Po aplikaci musí být uzávěr pevně zašroubován, aby se zabránilo možné kontaminaci.

Upozornění

Současné používání jiných očních přípravků
Pokud používáte i jiné oční kapky nebo masti, vyčkejte alespoň 5 minut mezi jednotlivými aplikacemi. Oční mast aplikujte jako poslední.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Krátce po vkápnutí přípravku do oka se může dočasně objevit rozmazané vidění. Proto neřídte motorová vozidla ani nevykonávejte jiné činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, dokud se vaše zraková schopnost nevrátí k normálu.

Pokud se nepříjemné pocity, kvůli kterým byl přípravek aplikován, nezlepší a přetrvávají, nebo se dokonce zhoršují, navštivte svého očního lékaře.

Aby se snížilo riziko křížové kontaminace a přenosu infekce, měla by obsah jedné lahvičky používat pouze jedna osoba.

Význam piktogramů na obalu

	Výrobce		Číslo šarže
	Datum výroby		Použitelné do
	Teplotní omezení		Přečtete si návod k použití
	Zdravotnický prostředek		Nepoužívejte, pokud je obal poškozen, a řiďte se pokyny k použití
	Sterilizováno aseptickými technikami		Uchovávejte v suchu
	Uchovávejte mimo dosah slunečního záření		Upozornění
	Počet kapek v 1 ml		Jedinečný identifikátor přípravku

Datum poslední revize textu: březen 2025

Nežádoucí účinky

Oční kapky OCUflash blue, roztok, jsou velmi dobře snášeny. Vzácně se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:

- Alergická reakce, která se může projevit jako mírná vyrážka, exfoliativní dermatitida nebo erythrema multiforme
- Změny epitelu
- Hyperémie
- Slzení
- Lokální podráždění (pálení, svědění, štípání, mírné nepohodlí)

Jakýkoli závažný incident, ke kterému došlo v souvislosti s prostředkem, by měl být nahlášen výrobcí neziaduceucinky@unimedpharma.sk a příslušnému orgánu prostřednictvím národního systému hlášení členského státu, ve kterém je uživatel usazen.

Interakce Zatím nejsou známy.

Klinický přínos

Oční kapky OCUflash blue, roztok, pomáhají předcházet podráždění, poškození očí, zánětu nebo infekci oka tím, že proplachují povrch oka od zbytkových částic, jako jsou cizí tělesa, prach, roztok fluoresceinu nebo hlenové a hnisavé sekrety, které by jinak mohly oko poškodit a/nebo způsobit zánět nebo infekci a zhoršení základního onemocnění. OCUflash blue lze také použít jako doplňkovou symptomatickou léčbu neinfekčního zánětu očních víček, spojivky (včetně alergie) a chronických infekcí spojivky.

Pokyny k uchovávání a likvidaci

Uchovávejte při pokojové teplotě 10–25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Nepoužitý přípravek vraťte do lékárny. Čistý obalový materiál zlikvidujte zodpovědně v souladu s místními pokyny v příslušné nádobě na tříděný odpad.

Obsah balení

Polyethylenová (LDPE) lahvička s kapátkem Novelia, závitový polyethylenový uzávěr s bezpečnostním kroužkem, etiketa. Plastová lahvička je balena v kartonové krabičce.

Velikost balení: 1 x 10 ml

Výrobce:



UNIMED PHARMA spol. s r.o.,
Oriešková 11, 821 05 Bratislava,
Slovenská republika
E-mail: unimedpharma@unimedpharma.sk
www.unimedpharma.eu